

# スパイラルシーネ（腕固定具）取扱説明書

## 1.はじめに


- 本製品は左腕用(L)、右腕用(R)の2種類あります。固定する腕にあわせてご使用ください。
- 本品は止血時や抜管・抜針予防の為、腕を固定する固定具です。それ以外の目的で使用しないで下さい。

## 2.使用前準備

### 【サイズ調整】


本品は腕の長さにより、S,M,Lとサイズ調整が可能です。  
※L(Large)サイズはそのままお使い頂けます。  
カッター等で下図のように切ってお使いください。  
※カッター等をご使用の際は十分にお気をつけください

### 【カット例】

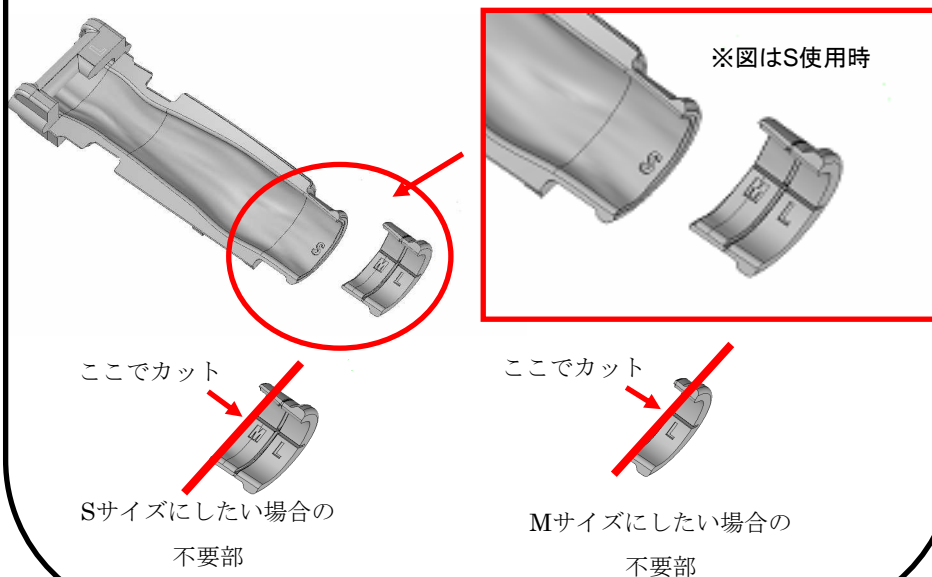

## 3.使用時

### 【使用方法】

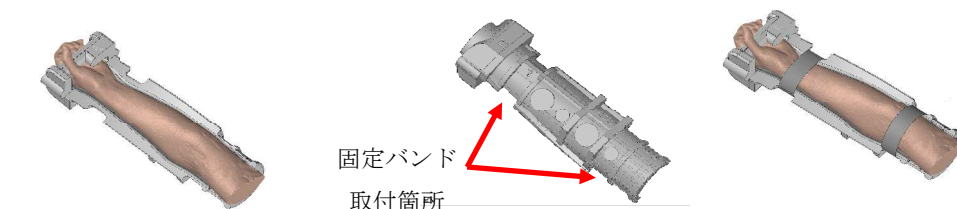

固定する腕に図のように装着し、グリップを握ります。

テープで手首を固定する場合は、別売りのテープを、固定バンド取付箇所に巻いて使用します。

## 4.仕様

### 【製品仕様】

品名 スパイラルシーネ  
材質 発泡スチロール  
質量 約30g  
医療クラス 雑品

### 【別売品】 NIREI ふしぎテープ 幅40mm 長さ100m

【参考価格 2,000円（税抜/送料別）】

HAKKO スチロールカッター

【参考価格 3,500円（税抜/送料別）】

## 5.使用上の注意

- 過度に力を加えると破損する恐れがあります。
- 本品装着時は肘の屈曲を最小限に留めるよう注意して下さい。
- 破損、汚れが目立つ場合は新しいものに交換して下さい。
- 水濡れ、直射日光、火気、高温多湿を避けて保管して下さい。

※本品の仕様等につきましては、予告なく変更になる場合があります。

### 【製造販売元】

社名:株式会社坂本設計技術開発研究所  
住所:大阪府枚方市津田山手2丁目20-1  
医療機器製造業登録番号:27BZ200271

TEL:072-897-5311 FAX:072-897-5313